






**INDICAZIONI PER IL CORRETTO IMPIEGO
DEL FACCIALE FILTRANTE FFP2 / FFP3 con valvola**

	<p>1. Tenere il facciale in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano</p>
	<p>2. Posizionare il facciale sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto</p>
	<p>3. Posizionare l'elastico superiore sulla testa all'altezza delle orecchie; posizionare l'elastico inferiore sulla sommità della testa</p>
	<p>4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitate di modellare lo stringinaso con una sola mano poichè può causare una diminuzione della protezione respiratoria</p>
	<p>5. La tenuta del facciale sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tappare la valvola con il palmo delle mani ed inspirare in maniera decisa. <p>La prova di tenuta è valida se all'interno dal facciale si avverte una discreta depressione (<i>pressione negativa</i>); se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o tensione degli elastici e ripetere la prova</p>