
















ISTRUZIONE OPERATIVA DI CONFEZIONAMENTO CON TNT

ESEMPIO DI CONFEZIONAMENTO IN DIAGONALE CON CARTA CRESPATA O TNT		ESEMPIO DI CONFEZIONAMENTO IN ORTOGONALE CON CARTA CRESPATA O TNT	
SEQUENZA	DESCRIZIONE	SEQUENZA	DESCRIZIONE
	L'oggetto da sterilizzare viene posizionato al centro del foglio in modo tale che gli spigoli formino un angolo retto con le diagonali del foglio di carta.		Posizionare il prodotto al centro del foglio
	Il foglio di carta è piegato verso l'alto lungo il lato largo del prodotto e ripiegato all'indietro parallelamente allo spigolo longitudinale, in modo da coprire completamente il prodotto.		Sovrapporre il lato anteriore della carta al prodotto
	Stessa procedura di cui al punto 2, da destra a sinistra.		Rivoltare lo spigolo della carta verso l'esterno, all'incirca fino all'altezza dell'oggetto.
	In corrispondenza del lato superiore del pacchetto viene a crearsi una tasca aperta su un lato longitudinale.	 	Rivoltare in avanti lo spigolo posteriore della carta. Rivoltare lo spigolo della carta verso l'esterno
	L'ultima porzione del foglio viene ripiegata sull'oggetto, rivoltando la punta della carta coprente nella tasca in modo da farla sporgere	  	Ripiegare lateralmente la carta, sovrapponendola all'oggetto
	La confezione viene successivamente chiusa con nastro indicatore di processo.		Fissare la carta con nastro indicatore di processo.

Struttura:
FAX
Tel



una sanità in salute Fa bene a tutti