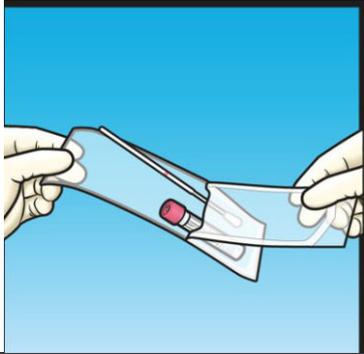
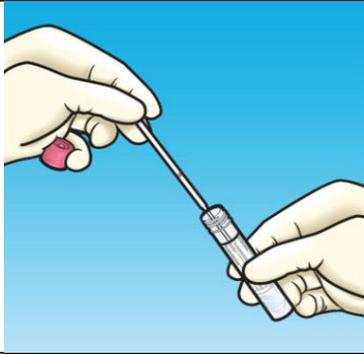
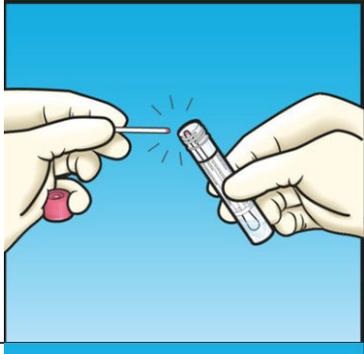
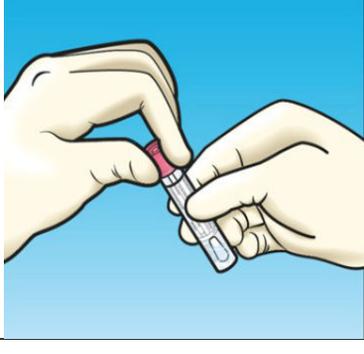


Codice: AL.RCRI.058.2015.00	Data emissione: Novembre 2015	Validità da: Novembre 2015	Allegato: 2
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------

Modalità esecuzione tamponi per esami colturali

	1. Aprire la bustina ed estrarre la sonda di prelievo e la provetta
	2. Utilizzare il tampone per prelevare il campione.
	3. Svitare il tappo ed introdurre il tampone con il campione nella provetta in modo asettico
	4. Rompere il tampone nel punto indicato dalla la linea colorata
	5 Chiudere con forza il tappo
	6. Applicare l'etichetta di identificazione del paziente.

Struttura: Settore Rischio Infettivo FAX 0142 434614 Tel 0142 434695	
--	--